



SARS-CoV-2 TEST ANTICUERPOS

INMUNOCROMATOGRAFIA COLOIDAL



LEPU MEDICAL



PRECISO

Alta precisión con anticuerpos de gran pureza




EFICIENTE

Resultados en 15 minutos



FACIL DE USAR

Una sola gota de sangre obtenida por punción en el dedo

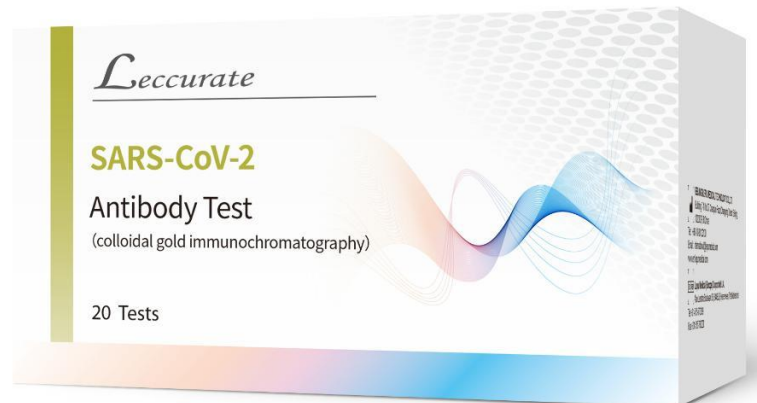



[Tipo de muestra] Sangre completa / Plasma / Suero


[Volumen muestra] 20ul / 10ul / 10ul

[Tiempo de reacción] 15 min.

[Embalaje] 20 test por caja

[Condiciones de almacenamiento] 4°C ~ 30°C


[Caducidad] 12 meses

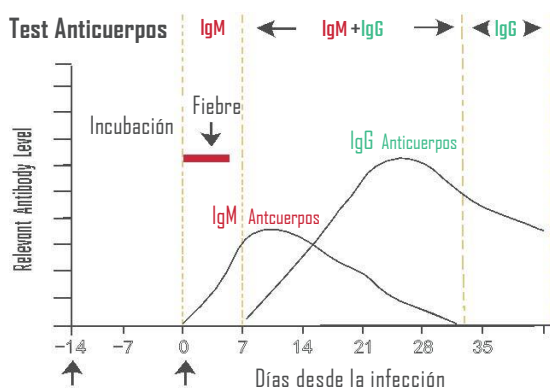

Los anticuerpos se desarrollan después del contagio. La inmunoglobulina M (IgM) aparece primero, actuando como señal de contagio. La inmunoglobulina G (IgG) aparece después, reaccionando de modo específico y contundente contra el virus

Uso


Paso 1. Añada 20ul de muestra de sangre completa / 10ul de Suero o plasma en la posición A.

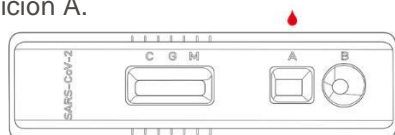


Paso 2. Añada dos gotas (80ul aprox.) de la dilución, que está incluida, en la posición B. En este momento empieza a contar el tiempo de reacción.



Paso 3. El resultado se podrá leer entre 10 y 20 minutos. No leer los resultados una vez pasados 20 minutos.

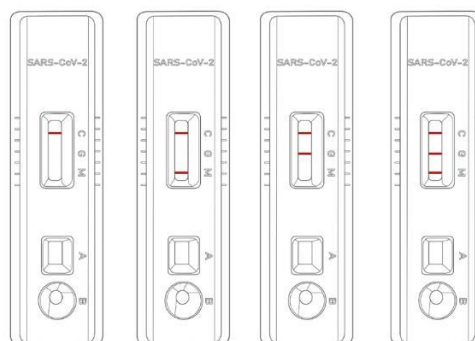

M: línea detección IgM

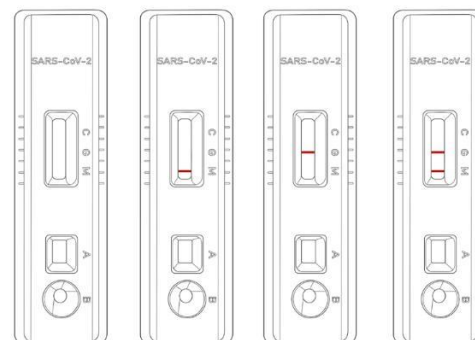

G: línea detección IgG

C: línea de control

Inválido Inválido Inválido Inválido

Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.



AB MEDICA GROUP S.A.

C/ Jericó, 10 bis
08035 - Barcelona
Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140

Av. Salvatella, 4
08210 - Barberà del Vallés (Barcelona)
Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656

Rodríguez San Pedro 41
28015 - Madrid
Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578

www.abmedicagroup.com - correo@abmedicagroup.com