


# Kit de Prueba Rápida CE de Antígeno de SARS-CoV-2

(Inmunocromatografía de Oro Coloidal)

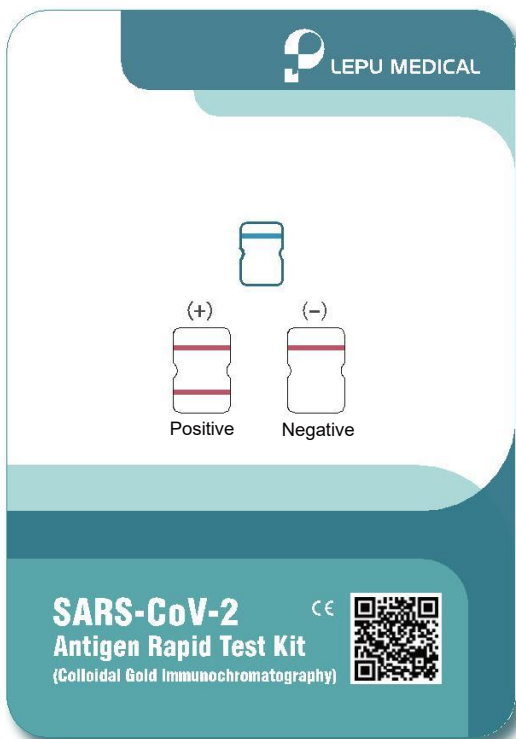

- ① No invasivo
- ② Fácil de usar
- ③ Práctico, no se requieren dispositivos
- ④ Rápido, obtenga resultados en 15 minutos
- ⑤ Estable, con alta precisión
- ⑥ Económico, rentable



Hospital



Sitio de prueba



Aeropuerto



Estación



Hotel




Corporación




Proyección  
masiva


## Método de prueba

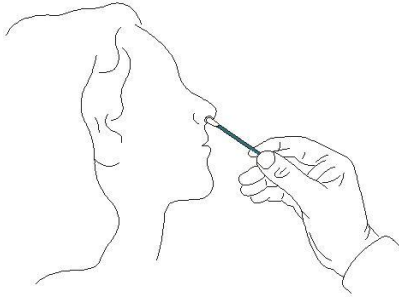


Paso 1: Use un hisopo para recolectar la muestra.

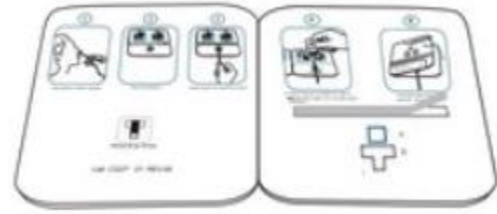

Paso 2: Retire el adhesivo.

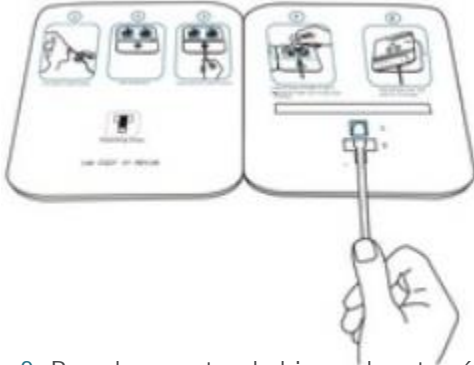

Paso 3: Pase la muestra de hisopado a través del fondo del pocillo B en el pocillo A.

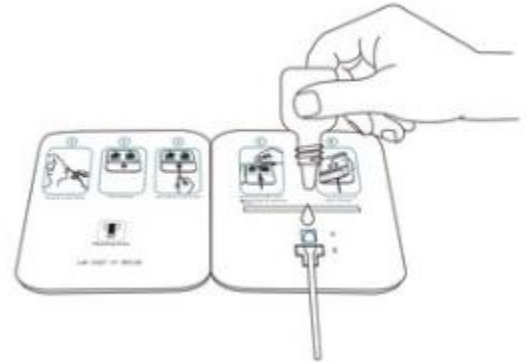


Paso 4: El resultado de la prueba se mostrará después de 15 minutos. Retire la cubierta protectora del pegamento de fijación. Pegue los lados izquierdo y derecho juntos.




Paso 5: Cierre la tapa izquierda. El resultado de la prueba se mostrará después de 15 minutos.

## Explicación de los resultados de la prueba


Positivo  
(+)

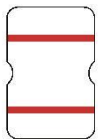

Negativo  
(-)

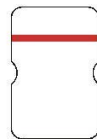

Inválido

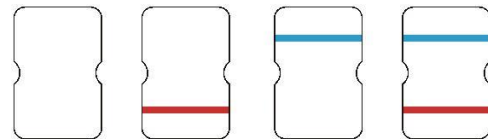

BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.



AB MEDICA GROUP S.A.

C/ Jericó, 10 bis  
08035 - Barcelona  
Telf. 932 541 540 Fax 934 185 140

Av. Salvatella, 4  
08210 - Barberà del Vallés (Barcelona)  
Telf. 937 299 400 Fax 937 191 656

Rodríguez San Pedro 41  
28015 - Madrid  
Telf. 915 433 559 Fax 915 447 578

www.abmedicagroup.com - correo@abmedicagroup.com