

2019-nCoV **Neutralización** Test Anticuerpos

(INMUNOCROMATOGRAFÍA COLOIDAL EN ORO)


CE

Para la evolución del efecto
vacuna



PRECISO

Anticuerpo de alta
pureza con alta
precisión

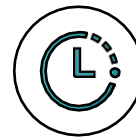

EFICIENTE

Resultado de la
prueba disponible en
15 min.



APTO

Adecuado para suero,
plasma y sangre

Este producto se utiliza para detectar de forma cualitativa los anticuerpos de neutralización del 2019-nCoV en muestras clínicas (suero, plasma, y sangre).



Principio

El test de prueba contiene la proteína 2019-nCoV (RBD) marcada con oro coloidal, el anticuerpo de ratón anti-IgG inmovilizado en el área de prueba G, el anticuerpo de ratón anti- IgM inmovilizado en el área de prueba M.

Pasos a seguir


Paso 1 Añada 2 gotas (aprox. 20µl) de sangre en la posición A.

Paso 2 Añada 3 gotas (aprox. 100µl) de muestra en la posición B, en este momento empieza a contar el tiempo.

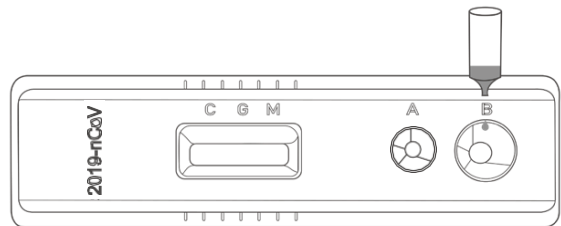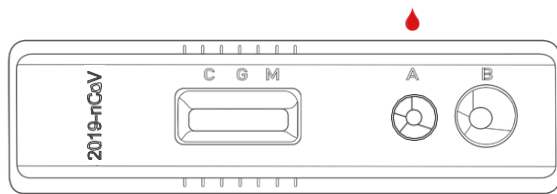

Paso 3 Los resultados de la prueba deben leerse pasados 15 min. No lea los resultados pasados 20 min.

INTERPRETACIÓN RESULTADO

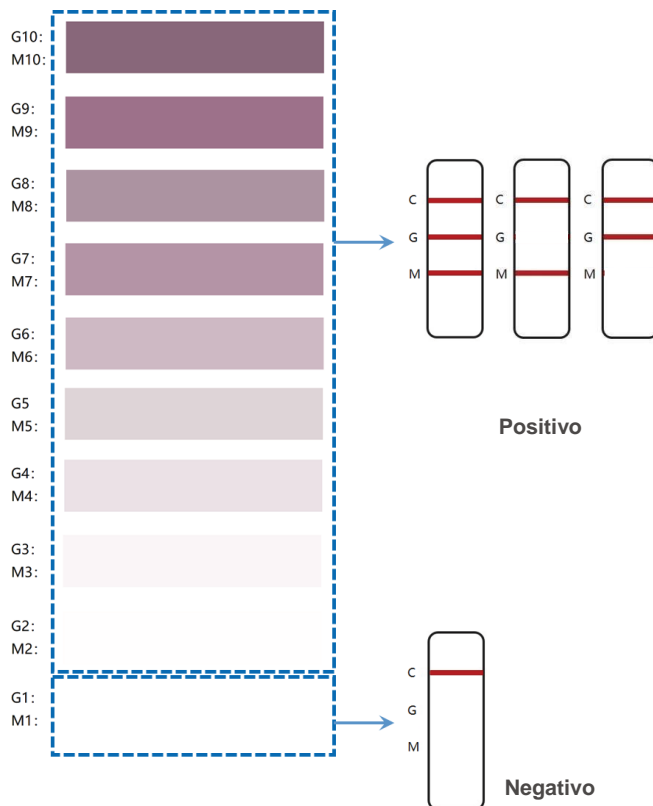

• Positivo

Aparece una banda roja purpura en el área de control de calidad (C) y en el área de prueba M/G

• Negativo

La banda roja purpura solo aparece en el área de control (C).

• Invalido

No aparece ninguna banda roja purpura en el área de control (C).

